

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen enthält, die Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.


HINWEIS

Für eine einfache Handhabung der Sprühflasche ist eine gewisse Flaschengröße notwendig. Aus diesem Grund ist die Flasche mit 7 ml Inhalt teilbefüllt. Dies stellt keinen Mangel dar.

Produktbeschreibung und Wirkung

Das Verbandmittel Quractiv[®]Derm enthält Chitosan-FH02[™] in wässriger, pH-hautneutraler Lösung. Das Spray bildet nach Antrocknung einen dünnen, elastischen, transparenten Film, der im Rahmen der üblichen Wundreinigung entfernt wird oder auf der Wunde verbleiben kann, bis er bei der natürlichen Hauterneuerung abgestoßen wird. In seiner Eigenschaft als Spray eignet sich das Produkt auch für die Behandlung schwer erreichbarer, unebener Wunden.

Chitosan besteht aus den Zuckerbausteinen Glucosamin und N-Acetyl-Glucosamin, welche natürlicherweise auch im menschlichen Körper vorkommen, und verfügt dadurch über eine ausgezeichnete Bioverträglichkeit. Das in Quractiv[®]Derm verwendete Chitosan-FH02[™] wurde in einer speziell für die Anforderungen der Wundheilung benötigten Form hergestellt. Studien belegen die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Quractiv[®]Derm.

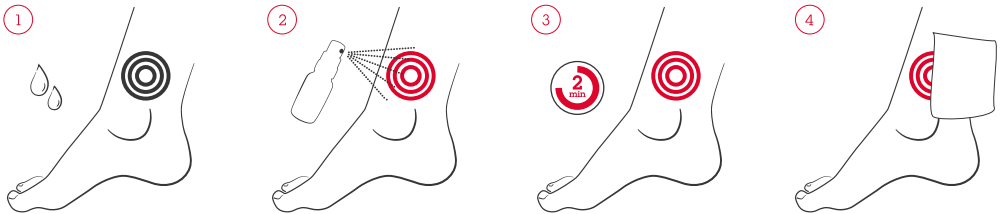

Anwendung

Die Wunde sollte nach derzeitigem Expertenstandard gereinigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch Sprühkopf ca. 5-mal betätigen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Wunde wenn möglich in eine waagerechte Position bringen und gleichmäßig aus ca. 10 cm Abstand mit Quractiv[®]Derm besprühen.

Den Sprühfilm mindestens zwei Minuten unabgedeckt einwirken lassen.

Gegebenenfalls kann die Wunde mit einem geeigneten Sekundärverband abgedeckt werden.

Bitte nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen, um ein Verkleben des Sprühkopfs zu verhindern.

Indikationen

Das Verbandmittel Quractiv[®]Derm dient zur äußeren, lokalen Behandlung von chronischen Wunden (wie z.B. Ulcus cruris), sekundären Wundheilungsstörungen, akuten Wunden und Brandwunden 1. und 2. Grades.

Anwendungshäufigkeit

Quractiv[®]Derm kann als primäre Wundauflage bei jedem Verbandwechsel angewendet werden.

Anwendungshinweise

Bei Anwendung mit Hydrogelen und Hydrokolloidverbänden sowie bei stark exsudierenden Wunden kann Quractiv[®]Derm seine Wirkung nicht voll entfalten. Starke Fibrinbeläge und Nekrosen müssen abgetragen werden (Debridement).

Kontraindikationen

Bisher sind keine Kontraindikationen bekannt.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es beim Auftragen zum Verspüren eines leichten Brennens kommen.

Allergische Reaktionen auf chitosanhaltige Medizinprodukte sind bisher nicht bekannt. Bei sehr vereinzelt beschriebenen allergischen Reaktionen auf Produkte, die Chitosan enthalten, ist ein kausaler Zusammenhang mit dem Inhaltsstoff Chitosan nicht sicher. Unverträglichkeitsreaktionen sind jedoch nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen.

Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen

Wundkontakt mit dem Pumpkopf vermeiden.

Falls die Flasche oder das Pumpsystem beschädigt sind, sollte Quractiv[®] Derm vorsichtshalber nicht mehr verwendet werden.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht in die Augen sprühen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Über die Anwendung von Quractiv[®] Derm bei Schwangeren und stillenden Müttern liegen keine Daten vor.

Lagerung und Haltbarkeit

Die Haltbarkeit ist auf dem Etikett und der Verpackung angegeben.

Quractiv[®] Derm bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) lagern.

Aufgrund des speziellen Pumpkopfsystems bleibt der Inhalt auch nach Anbruch für den weiteren Gebrauch steril.

Nach Anbruch innerhalb von zwölf Wochen aufbrauchen.

Zusammensetzung

Sterile Chitosan-Acetat-Lösung 0,75 %.

Enthält keine Konservierungsmittel.

Darreichungsform und Inhalt

Pump-Sprühflasche mit 7/12/20 ml Lösung

Hinweis: Zur einfacheren Handhabung größeres Flaschenvolumen mit Teilbefüllung bei 7 ml.

Hersteller

Medoderm GmbH
Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mainz
www.quractiv.com

 0482

 1/3/20D/004

Stand der Gebrauchsinformation

Juni 2016

Erklärung der verwendeten Symbole



Hersteller



Verwendbar bis:
Jahr-Monat



Chargenbezeichnung



Steril durch Anwendung
aseptischer Verfahrenstechniken



Achtung, Begleitdokumente
beachten



Temperaturbegrenzung bei
der Lagerung



Nach Anbruch innerhalb von
12 Wochen aufbrauchen.